

Инструкция по применению



HERBST II

АППАРАТ ГЕРБСТА II

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за выбор продукции Dentaaurum.
Для того чтобы получить самые лучшие результаты, используя данную продукцию, важно внимательно изучить и следовать инструкции по применению.

Инструкции по использованию не могут описать все возможные случаи и возможности применения. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем.

Поскольку наша продукция постоянно обновляется, мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к изделию. С оригинальной версией данной инструкции можно ознакомиться в интернете по адресу www.dentaaurum.com, даже если вы часто используете один и тот же продукт.

1. Производитель

Dentaaurum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Germany

2. Установка аппарата Гербст II

Для использования на верхней и нижней челюсти совместно с брекет-системами и техники многопетлевой дуги.

Трубки и стержни фиксируются специальными коннекторами к дуге брекет-системы.

Это способствует созданию дополнительной опоры без сотрудничества с пациентом (например, использование дополнительных тяг). Телескопическая трубка имеет паз, который крепится к дуге мульти-брекет системы с помощью винтов. Стержни крепятся к дуге в мезиальной области на первые моляры верхней челюсти и между клыком и первым премоляром нижней челюсти.

Внутриротовая установка:

После установки фиксирующих гаек на стальную дугу измерьте расстояние между ними вверху и внизу и по необходимости укоротите стержни. Затем закрепите стержни гайками с помощью винтов. Обычно, два более длинных винта используются на верхней челюсти, а более короткие – на нижней челюсти. В зависимости от ситуации, например, когда стержни цепляются за брекеты, винты могут быть заменены. Если нужно заменить дугу в брекет-системе, то вначале открутите гайки. Стержни нужно снять и заново установить после замены дуги. При необходимости, аппарат Herbst II можно активировать с помощью различных С-образных колец (см. ассортимент продукции).

3. Состав

Информация о составе, из каких материалов изготовлены все элементы аппарата Herbst II включена в список материалов, см. каталог или на сайте производителя www.dentaurum.com.

4. Правила техники безопасности

Правильность установки аппарата Herbst II и герметичность винтов должны проверяться через регулярные промежутки времени, чтобы предотвратить самопроизвольное разъединение устройства или проглатывание компонентов! При необходимости затяните винты и закрепите их специальным крепежным клеем, например Seka® Bond. Продукт не следует использовать, если есть аллергия на один или несколько материалов, входящих в состав.

5. Информация о продукции одноразового использования

Аппарат Herbst II предназначен только для одноразового использования. Восстановление аппарата Herbst II, который уже был использован (переработка) и его повторное использование на пациенте не допускается.

6. Ассортимент

Аппарат Herbst II, набор **REF 607-108-00**

С внутренними шестигранными винтами. Для установки на дуге совместно с брекетами, при технике многопетлевой дуги.

Состав набора:

- 1 x телескопическая трубка, правая
 - 1 x телескопическая трубка, левая
 - 2 x телескопический стержень
 - 2 x короткие шестигранные внутренние винты
 - 2 x длинные шестигранные внутренние винты
 - 4 x фиксирующие гайки
- Шестигранный ключ в комплект не входит.

Шестигранный ключ для аппаратов Herbst TS / I / II / SUS, стерилизуемый – артикул **REF 607-144-00** – 1 шт. Размер – 1,5 мм.

Внутренние шестигранные винты для аппарата Herbst II:

Короткий - артикул **REF 607-108-10** - 10 штук

Длинный - артикул **REF 607-108-20** - 10 штук

Фиксирующая гайка - артикул **REF 607-111-00** - 10 штук

Телескопическая трубка для аппаратов Herbst I / II:

Левая - артикул **REF 607-121-00** – 1 штука.

Правая – артикул **REF 607-122-00** – 1 штука.

Телескопический стержень для аппаратов Herbst I / II - артикул **REF 607-124-00** – 1 штука.

C-образные кольца для аппаратов Herbst I / II / IV:

Длина: 1 мм **REF 607-103-00** 10 штук

Длина: 2 мм **REF 607-104-00** 10 штук

Длина: 3 мм **REF 607-105-00** 10 штук

Длина: 4 мм **REF 607-107-00** 10 штук

Длина: 5 мм **REF 607-112-00** 10 штук

7. Соответствие стандартам качества

Dentaurum гарантирует безупречное качество производимой продукции. Эти рекомендации основаны на собственном опыте. Пользователь сам несет ответственность за обработку продуктов. Ответственность за неполадки не может быть возложена на производителя, так как он не имеет никакого влияния на применение и обработку в момент использования.

8. Объяснение символов, используемых на этикетке

Пожалуйста, обращайтесь внимание на этикетки на продукции.
Дополнительную информацию можно найти по адресу www.dentaurum.com
(пояснение символов REF 989-313-00).